

Het schoonmaken van kiwi vacuüm extractors

- Maak de kiwi zo snel mogelijk na de partus schoon in zeepsop tot dat er geen bloed/vuil meer zichtbaar is.
- Het sponsje uit de cup verwijderen.
- Pomp een paar keer met de cup onder water om eventueel bloed uit het slangetje te verwijderen.
- Na het schoonmaken een paar keer lucht pompen, om het water uit het slangetje te verwijderen.
- De schone kiwi aan de lucht laten drogen.

NB: Als direct na de partus schoonmaken niet mogelijk is, doe de kiwi dan in een bak met zeepsop, haal het sponsje er vast uit en pomp een paar keer onder water zodat eventueel bloed uit het slangetje is. Maak op een later tijdstip verder schoon.

Desinfectie vooraf aan verzending

De verzamelde kiwi's graag voor verzending desinfecteren door middel van onderdompeling in bv. alcohol 70%, vloeistof door het slangetje pompen en kiwi's 5 minuten in vloeistof laten staan (niet langer, dan lost de lijm op en laat het slangetje los). Daarna slangetjes leegpompen en kiwi's aan de lucht laten drogen.

Sterilisatie (in Uganda)

Steriliseren doen we in Mulago hospital m.b.v. Cidex (glutaataldehyde), dat ook wordt gebruikt voor het steriliseren van operatiematerialen die niet hittebestendig zijn.

Verzending van kiwi vacuüm extractors

Doe de schone, droge kiwi's in een plastic zak en sluit de zak goed af.

Doe de zak in een doos en stuur naar het afgesproken adres.

Email de gemaakte verzendkosten naar: bnolens@yahoo.com met een naam en rekeningnummer waarnaar het bedrag kan worden overgemaakt.